


## 5 オプションサービスの詳細設定



### ●利用者様に合わせて設定・ANSIEL増設

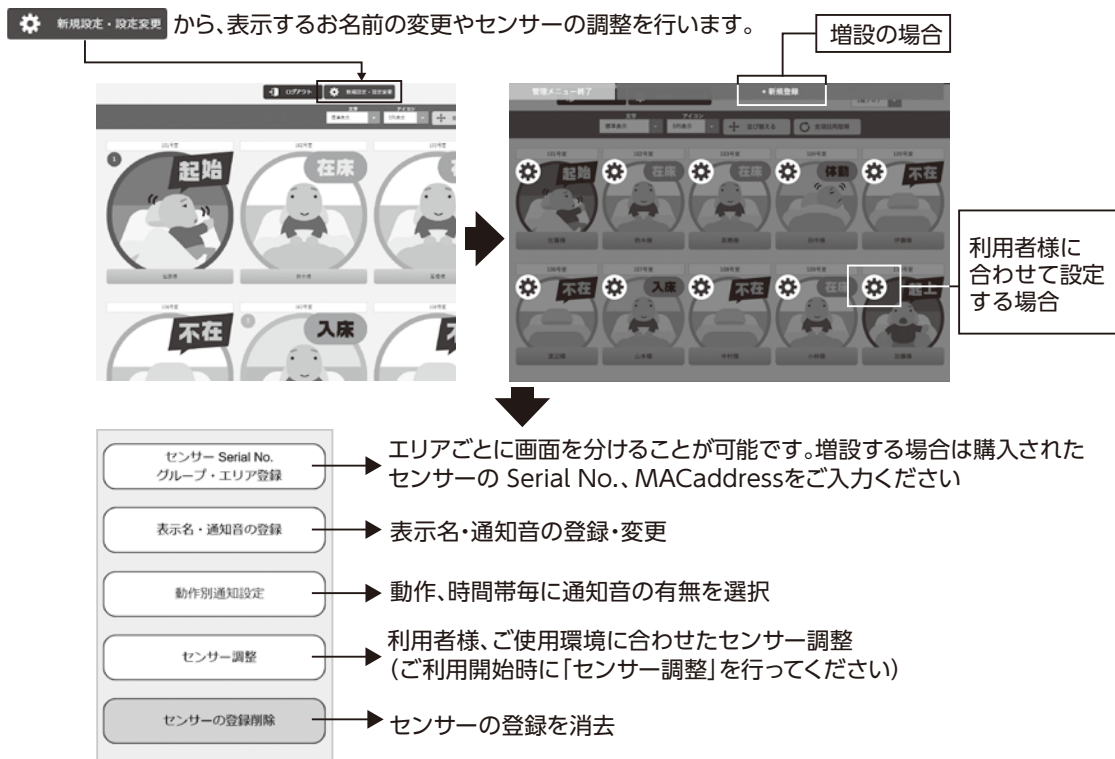

注意：センサー調整には3段階設定と自動調整があります。自動調整ではより細やかな調整が可能で推奨しておりますが、実際の使用環境にANSIELを設置し、ANSIEL上に利用者様が寝ておられるときに実施してください。

：センサーの登録消去には管理者ID、パスワードが必要です。

：複数台のANSIELをご使用になる場合は、各ANSIEL毎にWi-Fi接続を実施してください。

## ANSIEL サポート動画は

こちらのQRコードからご覧いただけます



<https://www.s-ansiel.com/movie.php>



※オプションサービスは予告なく変更・終了する可能性があります。

※このマニュアルで使用しているイラストや写真、画面は、商品のバージョンやお使いの端末によって、実際のものと異なる場合があります。

### 販売元

積水マテリアルソリューションズ株式会社  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6 (PMO新日本橋)  
☎ 03-6744-5786

### 製造元

積水化学工業株式会社 高機能プラスチックカンパニー 開発研究所 SDプロジェクト  
〒618-0021 大阪府三島郡島本町百山2-1  
☎ 075-962-8854 <https://www.s-ansiel.com>

MVB-02


2021.10 8HU ST/NK

# SEKISUI

# ANSIEL

アンシエル [型番 AS-101]

## オプションサービス ご使用開始までのフロー (Wi-Fi環境)

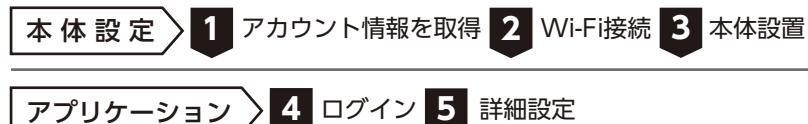

使用方法的詳細及び注意事項等については「オプションサービスご利用マニュアル」  
[<https://www.s-ansiel.com/pdf/op.pdf>] を必ずご確認ください



## 1 アカウント情報を取得する



①まずはログインページへ  
ブラウザから下記URLを検索し、利用規約をご確認の上、ログインページにお進みください

<https://client.s-ansiel.com/membership/license>



※ご使用ブラウザ  
非対応：IE 推奨：Chrome

②はじめての方の登録

「はじめての方は  
こちら」を  
タップしてください

組織ID  
organization

ユーザーID  
user ID

パスワード  
password

パスワードの再設定

ログイン

はじめての方はこちら

利用規約 お問い合わせ

③ご購入情報の登録  
ご購入者様の情報とANSIEL本体の  
情報をご入力ください

※ANSIEL裏面

※複数台ご購入の場合 ⊕ をタップ

各種情報を入力後「確認」をタップしてください

注意：端末の受信拒否設定などによりメールが届かない場合がありますので設定をご確認ください。  
：一度ご登録いただいている電話番号、メールアドレスを使用してアカウントを再発行することは致しかねます。

④アカウント情報の発行  
「確認」タップ後、ログイン  
画面に戻ります

アカウント情報が  
メール送信されます

ユーザーID  
user ID

パスワード  
password

パスワードの再設定

ログイン

登録情報を送信しました。

はじめての方はこちら

利用規約 お問い合わせ

⑤メールの受信

③で入力したメールアドレスにアカウント情報が届きます。

次の情報で<https://www.s-ansiel.com/app.php>からアプリケーションにログインください。

- 組織ID (組織) ID  
S0e1k2i3e4ui5
- ユーザーID  
sekisui
- ユーザーパスワード  
ansiel

※アカウントからセンサーの登録を消去される際には  
管理者ID、パスワードが必要です。

- 管理者ID  
12345
- 管理者パスワード  
abcdefg

組織IDとユーザーID・パスワード  
および管理者ID・パスワードが記載  
されています。

管理者ID・パスワードはセンサーの  
アカウント登録を消去する際に必要  
です。

アカウント情報を  
取得!

## 2 ANSIEL本体をWi-Fi接続する (アカウント情報とANSIEL本体は紐付けされています)

注意：Wi-Fiの混雑状況や強度によって接続が不安定な場合があります。インターネット回線の速度テストなどでご確認の上、Wi-Fiが安定している環境でご使用ください。

### ■Wi-FiルーターのWPSボタンから接続

#### ①ANSIELの電源をON コンセントを挿入し、ANSIELに ACアダプターを接続してください



電源ON：緑色点滅

#### ②Wi-Fiルーターの WPS※ボタンを押す



※Buffalo製のルーターではAOSS  
ボタンなど、メーカーによって表記  
は異なります。  
※対応周波数：2.4GHz

#### ③ANSIELの Wi-Fiボタンを押す



Wi-Fi接続時：  
青色点滅  
Wi-Fi接続完了：  
緑色点灯


Wi-Fi接続  
完了!

注意：②、③は順不同ですが、ルーターのWPS、ANSIELのWi-Fiボタンどちらにも有効時間に制限があります。緑色点灯にならない場合は再度①から実施して頂くか、「■Wi-FiルーターのWPSボタンから接続できない場合」をご覧ください。

### ■Wi-FiルーターのWPSボタンから接続できない場合


注意：接続されるWi-FiのSSID、パスワードをご確認いただき、お手元にご準備された上で下記操作に進みください。

#### ①ANSIEL裏面 スイッチ3をON

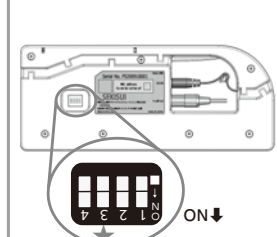

スイッチの切り替えは  
ボールペンなど、先端の  
細いものをご使用ください

#### ②ANSIELの電源をON コンセントを挿入し、ANSIELに ACアダプターを接続してください

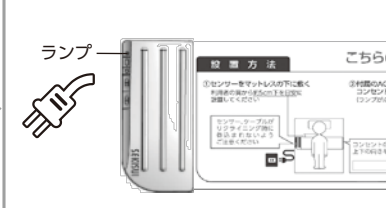

Wi-Fi設定時：青色点灯

#### ③ANSIELの Wi-Fi設定画面に接続




センサー周辺のPC等※  
(無線LAN対応の端末で)  
下記に接続ください  
ネットワーク名：  
SEKISUI-MIMAMORI\_\*\*\*\*\*  
(※はセンサー固有の番号)  
パスワード：1234567890

#### ④ブラウザのアドレスバーに 下記URLを入力

<http://192.168.4.1/>


#### ⑤ANSIELを接続するWi-Fiの登録

ANSIELを接続するWi-FiのSSID、パスワードを  
ご入力し「Set」をタップしてください

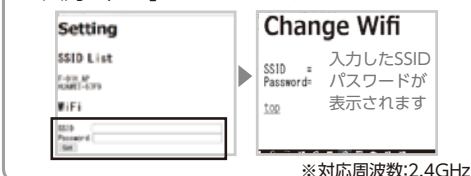

※対応周波数:2.4GHz

#### ⑥ANSIEL裏面 スイッチ3をOFF

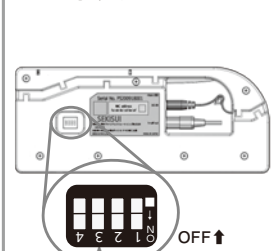

スイッチの切り替えは  
ボールペンなど、先端の  
細いものをご使用ください

電源の再投入でスイッチ3のOFF  
が反映されます

#### ⑦ANSIELを再起動 コンセントを挿入し、 ANSIELにACアダプターを 接続してください




電源ON：緑色点滅  
(30~40秒程度)  
Wi-Fi接続完了：緑色点灯

Wi-Fi接続  
完了!

## 3 本体設置

#### ①ANSIELに ACアダプターの挿入

ケーブルはコンセントの位置に  
応じて、センサー裏面の爪にかけて  
ください

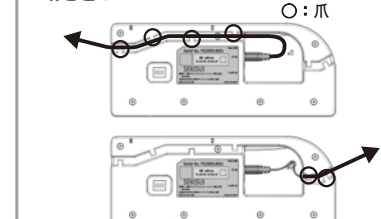


#### ②ANSIELの電源をON コンセントを挿入し、 ANSIELにACアダプターを 接続してください



電源ON：緑色点滅  
Wi-Fi接続完了：緑色点灯

#### ③マットレスの下に敷く 利用者様の肩から約5cm下(胸の 下)あたりが、センサーのシート部分 中央となるように設置してください

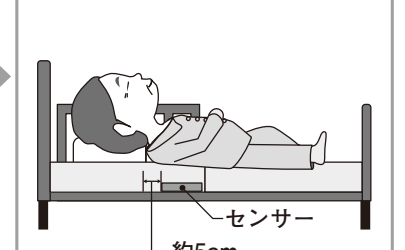

注意：ANSIELの位置ずれが懸念される場合は、同梱の固定用テープをセンサー本体裏面及びベッドフレーム部に対になるように貼り、固定してください

## 4 ANSIELオプションサービス (アプリケーション) にログイン

#### ①ダウンロードページへアクセス

ブラウザから、下記URLを検索してください

※ご使用ブラウザ  
非対応：IE 推奨：Chrome

<https://www.s-ansiel.com/app.php>



#### ②専用ウェブサイトへの移動/アプリのダウンロード


該当の箇所をご確認の上、  
リンク先をタップ

ブラウザの場合

iOS※の場合

Android※の場合


※iOSとAndroid端末はアプリの  
ダウンロードが必要です

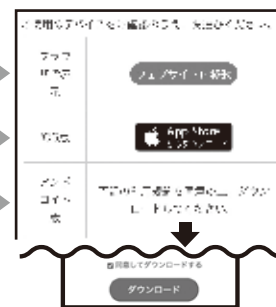

#### ③利用規約の確認

必ず利用規約をご一読ください。

Androidの場合

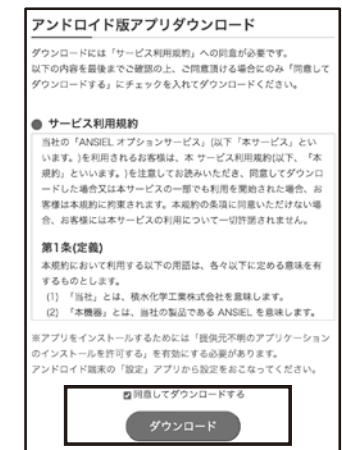

利用  
規約

#### ④ログイン情報の入力

1で取得した情報を入力して  
ログインしてください



#### ⑤アプリケーションの表示

1③でご登録くださったセンサー  
が表示されます



#### 注意

●ANSIELがWi-Fi未接続時には  
センサーのランプが緑色点滅とな  
り「通信エラー」が表示されます。  
接続するWi-Fiの仕様および設定  
をご確認ください。



●「体動」「起始」については入床後  
1分間は通知されません。

注意：ソフトウェア、アプリで同じアカウントをご利用される場合、共通のアカウント情報でログイン可能です。